

D Gebrauchsinformationen


SANOHR silicon – formbare Silikon-Ohrstöpsel

Das hautfreundliche medizinische Silikon ist besonders weich und lässt sich optimal verformen. In die Ohrmuschel eingelegt, passt es sich sanft an und deckt den Gehörgang schützend ab, ohne störendes Druckgefühl.

SANOHR silicon schützt vor unangenehmen Geräuschen und sorgt für einen angenehmen Schlaf oder konzentriertes Arbeiten. **SANOHR silicon** verhindert das Eindringen von Wasser in den Gehörgang und schützt das empfindliche Ohr vor Zugluft.

Gebrauchsanleitung

1. Kneten Sie das Silikonkissen mit **sauberen Händen** kräftig durch und formen Sie eine runde Kugel. Keine längliche Form.
2. Einzelne Kissen nicht teilen!
3. Einen Arm über den Kopf führen und den oberen Teil der Ohrmuschel des auf der anderen Kopfseite befindlichen Ohres während des Einsetzens leicht anzuheben. So wird der Gehörgang geweitet.
4. Platzieren Sie die Kugel in der Ohrmuschel über der Öffnung des Gehörganges.
5. Die Kugel leicht andrücken, so dass der Gehörgang gut abgedichtet wird und passgenau und sicher sitzt.
6. Die Ohrmuschel wieder loslassen.
7. Nach Gebrauch vorsichtig entfernen, ohne ruckartige Bewegungen.

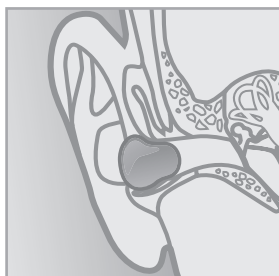

Nicht zum Tauchen verwenden! Der Wasserdruck in größerer Tiefe würde die Silikonkugel weiter in den Gehörgang drücken (Nicht mehr als 1 Meter Wassertiefe). Beim Springen ins Wasser oder durch heftige Bewegungen kann der Ohrenschutz verloren gehen!

Kinder dürfen den Ohrenschutz nur unter Anleitung von Erwachsenen benutzen. Bei Entzündungen des Ohres, Verletzungen des Trommelfells oder dem Einsatz eines Paukenröhrchens fragen Sie zuvor den behandelnden Arzt.

Lagerung und Pflege

Die Ohrstöpsel sind wiederverwendbar, wenn sie sauber und in gutem Zustand bleiben. Nach dem Gebrauch reinigen Sie die Ohrstöpsel mit neutraler Seife und warmem Wasser. Bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Ohrstöpsel in der Kunststoffbox an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Ohrstöpsel weiterhin verwendbar sind. Ersetzen Sie Ohrstöpsel, die Beschädigungen oder starke Verschmutzungen aufweisen.

Warnhinweise

Beim Einsetzen, Positionieren und Tragen der Ohrstöpsel bitte Anleitung des Herstellers beachten. Diese Ohrstöpsel können in lauten Umgebungen ständig getragen werden. Verwenden Sie die Ohrstöpsel niemals zum Tauchen. Pressen Sie die Ohrstöpsel nicht zu tief in den Gehörgang. Entfernen Sie Ohrstöpsel langsam aus dem Ohr. Ohrstöpsel vor Hitze und direktem Sonnenlicht schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie eine Erkrankung des Ohres (Infektionen oder perforiertes Trommelfell) haben oder hatten, fragen Sie Ihren Arzt, ob Sie die Ohrstöpsel einsetzen dürfen. Das Produkt kann durch bestimmte chemische Stoffe angegriffen werden. Bei Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise kann der Lärmschutz durch diese Ohrstöpsel eingeschränkt sein. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Hersteller.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/425. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der standardisierten Norm EN352-2: 2002 und erfüllt die Anforderungen der Verordnung 2016/425. Die anwendbare Rechtsprechung ist der Konformitätserklärung zu entnehmen; diese finden Sie unter: www.biotap.com/DC-BT-013.

Getestet und zugelassen nach Europäischer Norm EN 352-2:2002.

Ohrstöpsel aus formbarem Silikon BT-013

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	19,8	19,7	16,5	21,8	29,7	36,6	32,6
Standardabweichung (dB)	7,0	7,3	6,1	5,4	4,0	5,3	7,9
Angenommene Schutzwirkung (dB) AVP	12,8	12,4	10,4	16,4	25,7	31,3	24,8
Schalldämmdaten	H = 23 dB		M = 15 dB		L = 13 dB		SNR = 19 dB

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), P.O. Box 40, FI-00032 Työterveyslaitos, Finland, benannte Stelle Nr. 0403, zertifiziert, dass das Produkt die Anforderungen der standardisierten Norm EN352-2: 2002 und die Anforderungen der Verordnung 2016/425 erfüllt.



Hersteller:
bioTAP S.L.
c/Sant Galderic 13,
08395, Sant Pol de Mar
(Barcelona) - España

Vertrieb:
Innosan GmbH
D- 68723 Schwetzingen
info@sanohra.com
www.sanohra.com

NL Gebruiksaanwijzing


SANOHR silicon – kneedbare siliconen oordopjes

Het huidvriendelijke medische silicone is zeer zacht en laat zich optimaal kneden. Eenmaal aangebracht in de oorschelp neemt het de juiste pasvorm aan en sluit zo de gehoorgang beschermend af, zonder dat dit een storend drukgevoel in het oor geeft.

SANOHR silicon beschermt tegen storende geluiden en zorgt voor een aangename nachtrust of een verhoogde concentratie tijdens het werken. **SANOHR silicon** verhindert het binnendringen van water in de gehoorgang en beschermt het gevoelige oor tegen tocht.

Gebruiksaanwijzing

1. Kneed de siliconen kussentjes met **schone handen** goed door en maak er een rond bolletje van. Geen langwerpige vorm.
2. Afzonderlijke kussentjes niet delen!
3. Doe de arm over het hoofd en til de oorschelp aan de andere kant van het hoofd iets omhoog. Dit zal de gehoorgang verruimen.
4. Plaats het bolletje in de oorschelp over de opening van de gehoorgang.
5. Druk het bolletje voorzichtig aan zodat de gehoorgang goed afgedicht wordt en het pas-send en veilig vast blijft zitten.
6. De oorschelp weer loslaten.
7. Na gebruik voorzichtig verwijderen, zonder abrupte bewegingen.

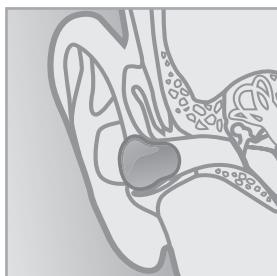

Niet geschikt voor gebruik met duiken! De waterdruk op grote diepte zou de siliconen dopjes verder de gehoorgang induwen (Niet meer dan 1 meter waterdiepte). Tijdens springen in het water of door heftige bewegingen kan de gehoorbescherming kwijt raken!

Kinderen mogen de oorbescherming alleen onder leiding van volwassenen gebruiken. Bij ontstekingen in het oor, verwondingen van het trommelvlies of gebruik van een trommelvliesbuisje vooraf de behandelende arts raadplegen.

Opslag en onderhoud

De oordopjes zijn herbruikbaar zolang ze schoon en in goede staat blijven. Reinig de oordopjes na gebruik met neutrale zeep en warm water en droog ze bij kamertemperatuur. Bewaar ze vervolgens in het kunststof doosje op een koele en droge plaats. Controleer de oordopjes regelmatig om u ervan te vergewissen dat ze nog steeds geschikt zijn voor gebruik. Oordopjes dienen vervangen te worden bij beschadigingen of wanneer het moeilijk wordt om ze te reinigen.

Waarschuwingen

De oordopjes moeten worden ingebracht, gepositioneerd en gedragen volgens de instructies van de fabrikant. De oordopjes kunnen onafgebroken worden gedragen in ruime omgevingen. Nooit voor het duiken gebruiken. Druk de oordopjes niet diep in de gehoorgang. Haal de oordopjes altijd langzaam uit het oor. Stel de oordopjes niet bloot aan warmte en direct licht. Buiten het bereik van kinderen houden. Raadpleeg voor gebruik eerst een arts als u oorproblemen (infecties of geperforeerd trommelvlies) heeft of heeft gehad. Bepaalde chemische stoffen kunnen een nadelige werking hebben op het product. Niet-naleving van de bovenstaande gebruiksinstructies kan de efficiëntie van de oordopjes schaden. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

In overeenstemming met verordeningen EU. Het product voldoet aan de eisen van de gestandaardiseerde norm EN en voldoet aan de eisen vastgesteld door verordening 2016/425. De toepasselijke jurisdictie is te vinden in de Conformiteitsverklaring; deze is te vinden op: www.biotap.com/DC-BT-013.

Getest en goedgekeurd volgens de Europese norm EN 352-2:2002.

Kneedbaar silicone BT-013

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	19,8	19,7	16,5	21,8	29,7	36,6	32,6
Standaarddeviatie (dB)	7,0	7,3	6,1	5,4	4,0	5,3	7,9
Veronderstelde beschermingswaarde (dB) AVP	12,8	12,4	10,4	16,4	25,7	31,3	24,8
Geluidsisolatie Data	H = 23 dB		M = 15 dB		L = 13 dB		SNR = 19 dB

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), P.O. Box 40, FI-00032 Työterveyslaitos, Finland, notified body no. 0403, heeft gecertificeerd dat het product voldoet aan de eisen van de gestandaardiseerde norm EN352-2:2002 en de eisen van verordening 2016/425.



Imp./Distr. Medzorg Ned. BV
www.sanohra.nl
www.medzorg.nl

Fabrikant:
bioTAP S.L.
c/Sant Galderic 13,
08395, Sant Pol de Mar
(Barcelona) - España

Distributeur:
Innosan GmbH
D- 68723 Schwetzingen
info@sanohra.com
www.sanohra.com